



## MASCARILLA DESECHABLE TIPO IIR

Mascarilla desechable de protección facial con 3 capas de protección y suave fijación en las orejas mediante elásticos, con soporte nasal integrado en el interior (clip nasal de fácil ajuste). Exterior en color azul e interior en blanco.

Producto no estéril. De un solo uso. No reutilizable.

Cajas de 50 unidades

- ✓ 3 capas
- ✓ Tipo IIR
- ✓ Con clip nasal ajustable
- ✓ Elásticos suaves



**CE** EN14683:2019

Declaración de conformidad disponible en [www.chemitool.com](http://www.chemitool.com)

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Modelo</b>	Mascarilla desechable tipo IIR
<b>Talla</b>	Tamaño unico
<b>Cantidad por paquete</b>	50 unidades
<b>Embalaje</b>	40 paquetes- 2 000 máscaras
<b>Material</b>	3 capas: TNT azul 20gr, Meltblown y TNT blanco 20gr.
<b>Medida</b>	17.5 cm x 9.5 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Sostenga la máscara con el lado azul hacia afuera.
2. Coloque el área del clip hacia arriba y colóquelo contra el puente de la nariz.
3. Sujete los elásticos a las orejas.
4. Asegúrese de que la mascarilla le cubra completamente la nariz y la boca.
5. Presione la pinza nasal para que se ajuste a su nariz.

ANTES DE UTILIZAR LA MASCARILLA, LÁVATE LAS MANOS Y ASEGÚRATE DE QUE NO ESTÉ DAÑADA.

## ALMACENAMIENTO

Almacene lejos de la luz solar directa, lejos de productos químicos y en un ambiente seco.

SAP	TAMANHO	EAN
CHS07050404	único	5604630061773

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea oralmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo tanto, excluimos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.