



MÁSCARA DESCARTÁVEL TIPO IIR

Máscara descartável para proteção do rosto com 3 camadas de proteção e fixação suave nas orelhas através de elástico, com suporte para o nariz integrado no interior (clipe nasal de fácil ajuste). Lado exterior em cor azul interior em branco.

Produto não estéril. Uso único. Não reutilizável.

Caixas de 50 unidades

- ✓ 3 camadas
- ✓ Tipo IIR
- ✓ Com clipe nasal ajustável
- ✓ Elásticos macios



CE EN14683:2019

Declaração de conformidade disponível em www.chemitool.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Máscara descartável tipo IIR
Tamanho	Tamanho único
Quantidade por caixa	50 unidades
Cartão	40 caixas - 2 000 máscaras
Material	3 camadas: TNT azul 20gr, Meltblown e TNT branco 20gr.
Dimensão	17.5 cm x 9.5 cm

INSTRUÇÃO DE USO



1. Segure a máscara com o lado azul para fora.
2. Coloque para cima a zona do clip e encoste à cana do nariz.
3. Prenda os elásticos nas orelhas.
4. Certifique-se que a máscara tapa o nariz e a boca totalmente.
5. Pressione o clip nasal de forma a ajustar ao seu nariz.

ANTES DE UTILIZAR A MÁSCARA, LAVE AS MÃOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTA NÃO ESTÁ DANIFICADA.

ARMAZENAMENTO

Guardar longe da luz solar direta, longe de produtos químicos e em ambiente seco.

SAP	TAMANHO	EAN
CHS07050404	único	5604630061773

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.